



Használati Útmutató

CHRONICFIX - kötésrögzítő



Igazgyöngy '98 Kft.

H - 8735 Csákány, külterület 024/4. hrsz

Tel: +36 1 5222-881 / 307

e-mail: info@igazgyongy98.hu ; www.igazgyongy98.hu/

A használati útmutató az alábbi linken érhető el:

<https://ifu.igazgyongy98.hu/>

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Termékkód	Terméknév	Méret	Karton / doboz / db
802104	Chronicfix	4m x 12 cm	15 x (5 x 1db)

A Chronicfix rugalmas kötésrögzítőt laikusok és egészségügyi szakemberek egyaránt használhatják klinikai és otthoni környezetben, felhasználás során közvetlenül csak épp bőrfelülettel érintkezhet és csak egyszeri használatra alkalmas. A termék feladata a sebre helyezett mull lap rögzítése, a megfelelő rögzítéshez egyéb rögzítő eszköz (ragtapsz, kapocs) alkalmazását nem igényli. A termék légáteresztő és rugalmas, ezáltal kényelmesen viselhető a beteg számára.

A Chronicfix 20 % pamutból, 27 % viszkózból és 53 % poliamidból készül. Egyesével, fólia csomagolásban csomagolva, majd kis-gyűjtő kartondobozban kerül forgalomra. A termék nyújtott hossza 4m +/- 10%.

Rendeltetés:

- Mozgó testrészek sebfedő kötéseinek rögzítése.

Tervezett felhasználó:

- Laikus felnőttek, és egészségügyi szakemberek egyaránt.

Eszköz indikációi:

- Traumás sérülések, műtéti sebek kötszereinek rögzítése.

Kontraindikáció:

- Az eszköz anyagaira való érzékenység.

Figyelmeztetések:

- Sérülésmentes csomagolás, bontatlan doboz.
- A kötésrögzítő egyszer használatos!
- Csak külsőleg alkalmazható!
- A kötésrögzítőt sérült, irritált bőrfelületen ne alkalmazza!
- Csak önmagához tapad, tehát bőrhöz, szőrhöz vagy ruházathoz nem.
- A terméken megtalálható az IgazGyöngy'98 Kft. védjegye és az alapvető termékinformációk.

ÚTMUTATÓ/ALKALMAZÁS

- Az útmutató nyelve magyar, a ChronicFix Magyarországon kerül forgalomba.
- A Chronicfix kifejezetten alkalmas mozgó testrészek sebfedő kötéseinek rögzítésére.
- Az egyes rétegek egymásra tapadásának köszönhetően könnyen, gyorsan és anyagtakarékosan rögzíthetünk.
- Rugalmasságából és tapadosságából következően a kötés hosszabb idő elmúltával sem mozdul el mozgás hatására sem. Megfelelő módon biztonsággal tartja meg a fedőkötéseket a következő kötéscseréig.

PANASZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ

Termékeinkkel kapcsolatos azonnali megoldást igénylő események, reklamációk bejelentéséhez használja az alábbi kontakt e-mail címet: info@igazgyongy98.hu

Bejelentés esetén mindig adja meg a bejelentő nevét, címét, közvetlen kapcsolatát, az esemény részletes leírását, beleértve az esemény bekövetkeztenek dátumát, az érintett termék(ek) megnevezését, katalógusszámát, tételkódját.















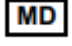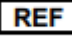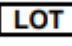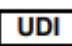

A bejelentését továbbítani kell a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felé is.

HULLADÉKKEZELÉS

A ChronicFix kötésrögzítő veszélyes hulladéknak minősül a felhasználása után. Az így keletkezett hulladék kezelését a veszélyes hulladéokra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja

A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁN FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Gyártó
	Gyártás dátuma
	Orvostechnikai eszköz
	Katalógusszám
	Tételkód
	Egyedi eszközazonosító
	Tilos újra felhasználni
	Nem steril
	Lejárati dátum
	CE-jelölése az I osztályba tartozó termékekhez
	Tekintse át a használati utasítást, vagy Tekintse át az elektronikus használati utasítást
	Szárazon tartandó
	Napfénytől védett helyen tárolandó
	A termék Latex-et tartalmaz
	Nem hullámlemez jellegű karton
	MDR szerint tanúsított termék